

機械器具 81 磁気治療器
管理医療機器 家庭用永久磁石磁気治療器(71016000)
ピップエレキバンインナークリップ

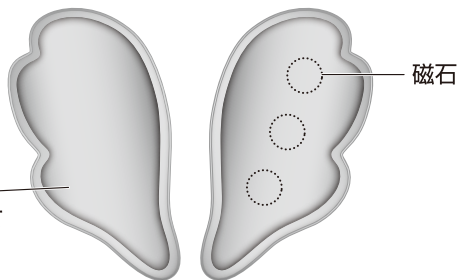
【禁忌・禁止】

心臓ペースメーカ等植込型医用電子機器または脳脊髄液短絡術用圧可変式シャントなどの医用電気機器を使用している方は、誤作動を招くおそれがありますので使用しないでください。

【形状・構造及び原理等】**1.構成**

本体
添付文書

肌に当たる面
(ビニールが付いていない面)

**2.原理**

永久磁石の磁力を利用して、人体に磁力線を浸透させて治療します。

3.最大磁束密度

130mT(ミリテスラ)

【使用目的又は効果】

一般家庭での磁気治療に使用する。
装着部位のこり及び血行の改善

【使用方法等】

ご使用にあたっては、説明書をよくお読みになってからご使用ください。また、機器に異常がないか確認してからご使用ください。

1.使用方法

(1)下着の肩ひも部分に取り付け使用する。

【使用上の注意】

1.医師の治療を受けている方や下記の方は必ず専門家と相談の上ご使用ください。

- (1)悪性腫瘍のある方
- (2)心臓に障害のある方
- (3)妊娠初期の不安定期または出産直後の方
- (4)糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある方
- (5)皮膚に感染症または創傷のある方
- (6)安静を必要とする方
- (7)体温38℃以上(有熱期)の方
例1.急性炎症症状(倦怠感、悪寒、血圧変動)の強い時期
例2.衰弱しているとき
- (8)ねんざ(捻挫)、肉離れなどの急性(とう)痛(疼)痛性疾患の方

2.他の治療器と同時に使用しないでください。

3.使用しても効果が現れない場合は医師などの専門家に相談してください。

4.頭部には使用しないでください。

5.使用する前には次のことにご注意ください。

- (1)時計、磁気カード、フロッピーディスクなど磁気の影響を受けるものには近づけないでください。
- (2)製品に破れがないかどうかを点検し、磁石の装着部に破れなどがある場合は使用しないでください。
- (3)しばらく使用しなかったときには、表面に金属などの異物が吸引付着していないことを確認してください。

6.使用中には次のことにご注意ください。

- (1)身体に異常を感じたときは、使用を直ちに中止してください。
- (2)装着部に発疹、発赤、かゆみなどの症状が現れたときは、使用を直ちに中止してください。
- (3)磁気共鳴画像診断装置(MRI)の検査を受ける方は、検査の前に取りはずしてください。

7.使用後及び保管には次のことにご注意ください。

- (1)機器を廃棄するときには、お住まいの市町村の廃棄方法に従ってください。

8.機器の取り扱いには次のことにご注意ください。

- (1)機器は改造しないでください。

【保管方法及び有効期間等】

- 1.小児および監督を必要とする方の手の届かない場所に保管してください。
- 2.高温多湿を避けて保管してください。
- 3.製品の羽根部分をプラスチック、塗料塗布面、印刷面に長時間触れさせておくと、製品の成分によりべとつくことがありますので離して保管してください。

【保守・点検に係る事項】

使用に際し、異物の付着等がないか確認の上ご使用ください。常に使用前後の点検を励行し、機器に異常が発見された場合にはすぐに使用を中止し、弊社お客様相談室までご連絡ください。

【包装】

2個入

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元:ピップ株式会社

住所:奈良県天理市南六条町182番地(奈良工場)

お問い合わせ先:お客様相談室 06-6945-4427(10:00~17:00)

製造業者:ピップ株式会社

住所:大阪市中央区農人橋2丁目1番36号