

機械器具 81 磁気治療器
管理医療機器 家庭用永久磁石磁気治療器(71016000)
ピップマグネネック E

【禁忌・禁止】

心臓ペースメーカ等植込型医用電子機器または脳脊髄液短絡術用圧可変式シャントなどの医用電気機器を使用している方は、使用しないでください。

[誤作動を招くおそれがあるため]

【形状・構造及び原理等】

1. 構成

本体
添付文書



2. 原理

本製品は、ネックワイヤー部にプレートで永久磁石からなる磁気板を取り付けたもので、耳に掛けて患部に磁気板を接触させ、永久磁石による磁気を作用させて治療を行う家庭用永久磁石磁気治療器である。

3. 最大磁束密度

200mT (ミリテスラ)

【使用目的又は効果】

一般家庭での磁気治療に使用する。

装着部位のこり及び血行の改善

【使用方法等】

ご使用にあたっては、説明書をよくお読みになってからご使用ください。

また、機器に異常がないか確認してからご使用ください。

1. 使用方法

(1) 耳にかけて磁気板が首にあたるように装着する。

【使用上の注意】

1. 医師の治療を受けている方や下記の方は必ず専門家と相談の上ご使用ください。[症状が悪化するおそれがあるため]

- (1) 悪性腫瘍のある方
- (2) 心臓に障害のある方
- (3) 妊娠初期の不安定期または出産直後の方
- (4) 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある方
- (5) 皮膚に感染症または創傷のある方
- (6) 安静を必要とする方

(7) 体温 38℃ 以上(有熱期)の方

例 1. 急性炎症症状(倦怠感、悪寒、血圧変動)の強い時期

例 2. 衰弱しているとき

(8) 捻挫、肉離れなどの急性疼痛性疾患の方

2. 使用しても効果が現れない場合は医師などの専門家に相談してください。

3. 機器の取り扱いには次のことにご注意ください。

(1) 他の治療器と同時に使用しないでください。

(2) 頭部には使用しないでください。

(3) 機器は改造しないでください。

4. 使用する前には次のことにご注意ください。

(1) 時計、磁気カード、フロッピーディスクなど磁気の影響を受けるものには近づけないでください。

(2) しばらく使用しなかったときには、表面に金属などの異物が吸引付着していないことを確認してください。

5. 使用中には次のことにご注意ください。

(1) 身体に異常を感じたときは、使用を直ちに中止してください。

(2) 装着部に発疹、発赤、かゆみなどの症状が現れたときは、使用を直ちに中止してください。

(3) 磁気共鳴画像診断装置(MRI)の検査を受ける方は、検査の前に取りはずしてください。

6. 使用後及び保管には次のことにご注意ください。

(1) 機器を廃棄するときには、お住まいの市町村の廃棄方法に従ってください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 小児および監督を必要とする方の手の届かない場所に保管してください。

【保守・点検に係る事項】

使用に際し、異物の付着等がないか確認の上ご使用ください。常に使用前後の点検を励行し、機器に異常が発見された場合にはすぐに使用を中止し、弊社お客様相談室までご連絡ください。

【包装】

1 個入

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元: ピップ株式会社

住所: 奈良県天理市南六条町182番地(奈良工場)

お問い合わせ先: お客様相談室(説明書参照)

製造業者: ピップ株式会社

住所: 大阪市中央区農人橋2丁目1番36号

ピップエレキバン®

ネックバンド 説明書

ご使用の前にこの説明書をよくお読みいただき、
正しくご使用ください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

⚠ 注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。
※物的損害とは家屋・家財および家畜・ペットに関わる拡大損害を示します。


1. 首筋に湿疹や傷がある場合は使用しないでください。症状が悪化するおそれがあります。
2. 使用中皮膚や体調に異常を感じた場合は、すぐに使用を中止し、医師にご相談ください。
3. ご使用のたびに、本体に金属片(針やピンなど)が付着していないか確認してください。
鋭利な金属片が付着したまま装着すると、けがをするおそれがあります。
4. サウナなど、高温になる場所で使用しないでください。
5. 火気のそばに置かないでください。変形するおそれがあります。

お願い



1. 下記のような使用はしないでください。劣化や変色するおそれがあります。
① クリーム、スプレー、シップなど薬剤と併用 ② 入浴剤を入れた風呂への入浴 ③ 温泉浴 ④ 海水浴
2. ワイヤーや磁石プレートを強く折り曲げないでください。ワイヤーが折れたり、はずれたりするおそれがあります。
3. 使用目的以外の用途に使用しないでください。
4. 製品を取りはずす際は、ピアス・イヤリング・ネックレスが絡まないようにご注意ください。
思わぬケガや製品の破損に繋がるおそれがあります
5. 就寝時に使用しないでください。

ご使用方法


着脱方法

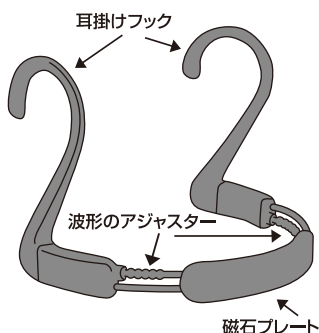

- ① 耳かけフックを図のように
垂直に立ててください。

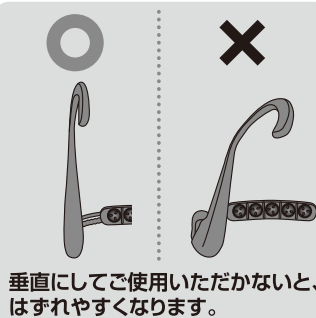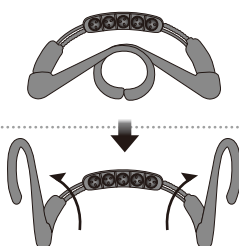




- ② 磁石プレートが
肌に直接触れる
ように首に装着
してください。

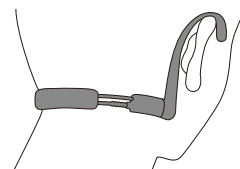


長さ調節方法

長さ調節は首から取りはずした状態で行ってください。

左右に1本ずつある波形のアジャスター()を
引っぱって好みの長さに調整してください。

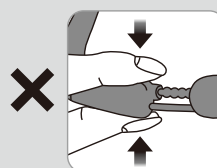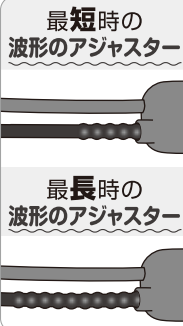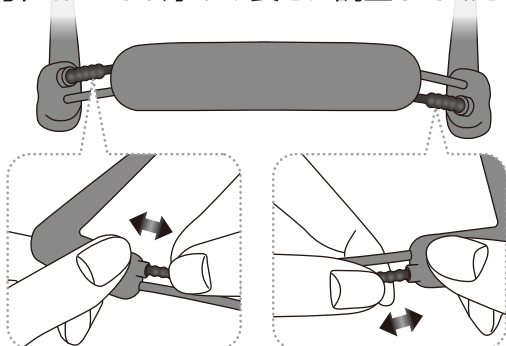

長さ調節時に
図のような向きで
おさえないでください。
波形のアジャスターが
調整づらくなります。

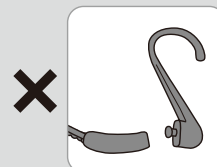

耳かけフックは
はずさないでください。
はずれた場合は元に戻して
ご使用いただけますが
繰り返すと着用中に
製品がはずれやすくなります。
元に戻す時はしっかり
奥まで差し込んでください。

お手入れ方法

まめに水、またはぬるま湯で洗ってください。石鹸や洗剤での洗浄は劣化のおそれがあります。
お手入れをしないままでのご使用は、汗や皮脂による黄変や臭気が発生するおそれがあります。



ピップエレキバン
HPIはこちら



お問い合わせ



ピップ株式会社
大阪市中央区農人橋2-1-36
〒540-0011

お客様相談室

☎(06)6945-4427
土・日・祝日を除く10:00~17:00